

U.O.SEMP.DIAGNOSTICA CITOFUORIMETRICA H772	Ospedale Policlinico San Martino MODULO		MODH772_0042LAB	
	MODALITA' DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA ESAMI PER CITOFUORIMETRIA		Rev. 2	Data 21/01/2019

Campione:	Provetta	Modalità di prelievo	Consegna
<b>Sangue periferico</b>	Provetta da emocromo (tappo viola scuro anello nero da 4 ml - K3 EDTA) Cod. 66221	Aspirare il sangue fino a completo esaurimento del vuoto (volume minimo accettabile 1 ml). <b>La presenza di vuoto residuo nella provetta fortemente influenza il prelievo automatico del campione con conseguente inaccuratezza dei dati.</b>  Agitare invertendo la provetta 5-6 volte. Indicare eventualmente se HIV+, HCV+, HBV+.	<b>Squadre normali</b>  Temperatura (18°-25°C)
<b>Aspirato midollare</b>	Provetta da emocromo (tappo viola scuro anello nero da 4 ml - K3 EDTA) Cod. 66221	Trasferire l'aspirato in provetta da emocromo. Agitare invertendo la provetta 5-6 volte.  <b>Indicare sull'etichetta:</b> nome paziente data, reparto e <b>BM (midollo)</b>  Indicare eventualmente se HIV+, HCV+, HBV+.	<b>Squadre normali</b>  Temperatura (18°-25°C)  * NB: Per analisi di plasmacellule, non processabile il giorno dopo il prelievo per la labilità degli elementi plasmacellulari.
<b>Lavaggio Broncoalveolare (BAL)</b>	Provetta di grandezza idonea	Il prelievo viene generalmente effettuato dai Servizi di Broncoscopia secondo modalità proprie. Per prelievi effettuati in altri Reparti, trasferire il liquido recuperato dal lavaggio (eccetto quello del primo bolo contenente una maggior quantità di cellule di origine bronchiale) in provettone da 50 ml.  Se ematico, è opportuno aggiungere 1 goccia di Eparina VISTER (50 UI/ml finale).  Indicare eventualmente se HIV+, HCV+, HBV+.	<b>Squadre normali</b>  Temperatura (18°-25°C)
<b>Liquidi biologici (eccetto Liquor)</b> (peritoneale, pericardico, pleurico, etc)	Provetta da emocromo (tappo viola scuro anello nero da 4 ml - K3 EDTA) Cod. 66221	Minimo volume: 4 ml.  Per campioni con bassa cellularità, spedire volumi maggiori di campione.  Indicare eventualmente se HIV+, HCV+, HBV+.	<b>Squadre normali</b>  Temperatura (18°-25°C)
<b>Liquor</b>	Provetta di grandezza idonea.	Minimo volume: 1 ml. Maggiore è il volume di Liquor inviato, più accurati sono i risultati.  Indicare eventualmente se HIV+, HCV+, HBV+.	<b>Squadre urgenti</b>  Temperatura (18°-25°C) <b>N.B. Non processabile 3 ore dopo il prelievo per la labilità della componente cellulare.</b>

**Campioni HIV+, HCV+, HBV+: TRASPORTO IN PROVETTONE DI CONTENIMENTO RIGIDO CON TAPPO CHIUSO**

**Luogo di Consegna:** U.O.S. Diagnostica Citofluorimetrica, Pad 15, ex IST sud, Piano 2 (Dott.ssa E.Tedone)

Tel: 010/555 5952- FAX: 010/555 6392

**Orario di accettazione:** ore 8-16 (Lunedì - Giovedì) (i campioni che pervengono dopo tale orario vengono processati il giorno dopo), Venerdì e pre-festivi (8-14) (i campioni che pervengono dopo tale orario vengono processati il giorno lavorativo successivo)

Redatto UO	Controllato RAQ U.O.	Approvato Direzione U.O.
---------------	-------------------------	-----------------------------