



**OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO**  
**Sistema Sanitario Regione Liguria**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

Largo R. Benzi,10  
16132 Genova

**U.O.C. Medicina di Laboratorio**  
(Direttore: Dott. f.f. Luca Nanni )

**MODULO RICHIESTA INTERNA PROVETTE DETERMINAZIONE**  
**"CALPROTECTINA FECALE"**

**Da inviare al fax: 6737**

Ufficio Coordinatore  
U.O. Medicina di Laboratorio  
tel. 3197/5198/3185

**Reparto richiedente:** \_\_\_\_\_

**Centro di Costo:** \_\_\_\_\_

**tel.:** \_\_\_\_\_

**fax:** \_\_\_\_\_

Si richiede/richiedono all'U.O. Medicina di Laboratorio:

N° \_\_\_\_\_ provetta CALEX® CAP

**ATTENZIONE: la provetta CALEX® CAP deve essere conservata in frigorifero 2 - 8 °C prima e dopo l'uso (Rif.: IOAZH75\_0001 Determinazione Calprotectina Fecale)**

Data: \_\_\_\_\_

*Il Coordinatore Infermieristico*  
(timbro e firma)

---

## Feci solide


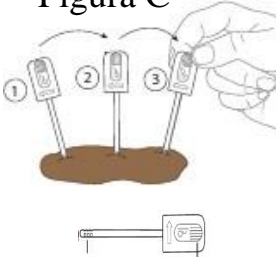

|   |   |
|---|---|
| <p>1- Prima di iniziare la raccolta del campione, etichettare il Dispositivo CALEX® Cap con apposito codice a barre.</p>  |   |
| <p>2- Raccogliere un campione di feci in un contenitore asciutto e pulito (es. contenitore feci)</p> <p>3- Tenere il tubo in posizione verticale e rimuovere il tappo bianco di campionamento ruotandolo e tirandolo contemporaneamente verso l'alto (Figura B).</p> <p><b>N.B.</b> Attenzione: Non svitare il tappo blu!</p>   | <p>Figura B</p>    |
| <p>4- Immergere l'asticella di campionamento con le scanalature nelle feci ruotandolo e rimuovendolo subito dopo. Ripetere la procedura in 3-5 diverse posizioni del campione per riempire completamente le scanalature (Figura C).</p> <p><b>N.B. Evitare la contaminazione con urina o acqua</b></p> <p><b>Basta una piccola quantità di feci:</b> una quantità eccessiva rende la raccolta inutilizzabile per l'esecuzione del test. Le feci in eccesso saranno comunque trattenute nell'imbuto durante la reintroduzione dell'asticella nel tubo.</p> | <p>Figura C</p>   |
| <p>5- Il tappo con l'asticella di campionamento deve essere introdotto nuovamente all'interno del tubo e premuto verso il basso nella posizione di blocco finale (si avvertono e si sentono due scatti. (figura D). Invertire la provetta una decina di volte.</p> <p><b>Conservare il campione in frigorifero fino alla riconsegna, che deve avvenire al massimo entro 3 giorni</b></p>  | <p>Figura D</p>  |

Tabella 1. Campionamento feci solide con Dispositivo CALEX® Cap.

In caso di **Feci liquide**, trasferire circa tre gocce di campione direttamente nell'apposito Dispositivo CALEX® Cap.