


Inform@FOGLIO.....N° 18

Informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro
Ospedale Policlinico San Martino

ISTRUZIONI SUL POSIZIONAMENTO

1) Aprire interamente il telo e posizionarlo sul letto senza materasso:

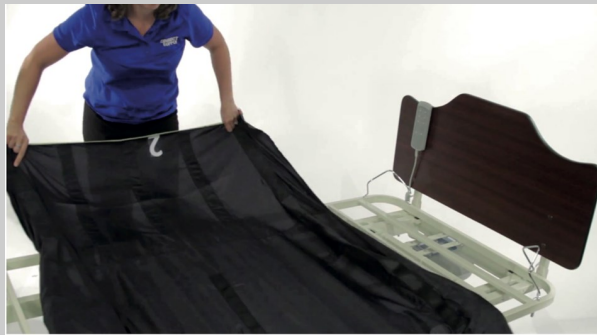

2) Piegarlo a metà i risvolti e unirli attraverso i velcri arancioni, in questa fase è importante il corretto posizionamento del telo, in quanto può compromettere la sua efficacia. I numeri presenti sui tre lati devono essere sempre visibili e il telo deve essere piegato in modo tale che i bordi colorati siano rivolti verso l'esterno, come mostrato in figura:



3) Una volta posizionato il telo, il risultato deve essere il seguente, con le maniglie di trazione inserite nelle apposite tasche e chiuse con il velcro;



4) Dopo aver unito le estremità e sistemati i risvolti, posizionare sopra al telo il materasso e allacciare le cinghie poste agli angoli del telo:

