



TSL44

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione isotonica, isoidrica, per detergere e igienizzare qualsiasi parte di strumento di diagnostica oftalmica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire la sonda o il cono del tonometro o altro strumento con una salviettina non abrasiva.
Immergere l'accessorio nel TSL44 per un tempo di 2-5 minuti.

AVVERTENZE

TSL44 è prodotto in ambiente controllato, una volta aperto deve essere utilizzato entro due mesi dall'apertura; l'eventuale residuo deve essere gettato; Non usare se il sigillo non è integro;

Per evitare ogni contaminazione non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie;
Richiudere bene il flacone dopo l'uso;
Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza; tenere lontano dalla portata dei bambini.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

pH	7,30 ± 0,15
Osmolality	310 ± 20 mOsm/Kg

COMPOSIZIONE

Miscela acquosa a base di borati, composti quaternari di ammonio e polimeri.

CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO

Conservare in luogo fresco, asciutto e aerato.
Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti.

UFI: 8300-F05S-500K-AU6E

Schalcon S.p.A. unipersonale

Direzione e coordinamento Omisan farmaceutici S.r.l. unipersonale

viale Enrico Ortolani, 195 - 00125 Roma (RM), Italia

Tel. +39 06 5231331 - info@schalcon.com

P. IVA e R. I. di Roma: IT 01137561005 - Cod. fisc. 02936380589 - Cap. Soc. € 2.000.000 i.v.

www.schalcon.com