

## SCHEDA N° 13

### ALLAGAMENTO IN PRESENZA DI IMPIANTO A RISONANZA MAGNETICA

	<b>SEQUENZA AZIONI</b>
1	Qualora fosse necessario, <b>prima di entrare</b> , per qualsiasi motivo, nel locale dove è presente la Risonanza Magnetica <b>depositare tutti gli oggetti metallici ferromagnetici</b>
2	<b>Solo in caso di ESTREMA NECESSITÀ:</b> prima di intervenire in vicinanza del magnete, interrompere la generazione del campo magnetico agendo sul pulsante rosso collocato in prossimità dell'accesso al locale; tale operazione darà l'avvio irreversibile alla procedura di <b>QUENCH</b> del magnete, che comporta una rapida evaporazione ed espulsione di tutto il liquido criogenico attraverso una conduttura a tetto; il tempo necessario per l'annullamento del campo è circa 30 sec; una volta terminata l'emergenza, sarà necessario provvedere al ripristino dell'apparecchiatura e dell'impianto
3	Avvisare tempestivamente l'Esperto Responsabile
	<b>In caso di emergenza o di criticità non risolta:</b>
	<b>Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999</b>