

Inform@FOGLIO.....N° 19

Informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

Ospedale Policlinico San Martino

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO IN CASO DI EVACUAZIONE

1) e 2) Estrarre per prima l'estremità destra del telo da sotto il materasso, tirando dal bordo colorato e posizionarla sopra al soggetto:



3) e 4) Estrarre l'estremità sinistra (afferrare il telo sempre dal bordo giallo) e sovrapporlo all'estremità destra, le due estremità devono essere "attaccate" mediante i velcri:



N.B. Bisogna premere la mano sopra al telo in modo tale che i velcri grandi e neri si attacchino tra loro.

5) Tirare l'estremità al lato dei piedi posta sotto il materasso e fissarla saldamente al velcro presente sul telo sottostante, durante questa operazione è possibile inserire/inglobare eventuali attrezzature sanitarie che vanno portate con il paziente:
Alzare il materasso e afferrare la maniglia al lato dei piedi del paziente:



N.B. Afferrare la maniglia al lato della testa del paziente, solo nel caso in cui si è in due operatori, altrimenti si potrebbero impigliare e rallentare l'azione.

6) Dopo aver bloccato il letto, abbassato le sponde e il letto, prendere con due mani la maniglia corta (lato piedi), sollevare leggermente il materasso e ruotarlo, con il paziente, di circa 80 gradi:



7) Mantenere il materasso in posizione orizzontale per iniziare la discesa dello stesso dal letto.
Tirare lentamente il materasso finché lo stesso non giace interamente sul pavimento:



8) Procedere all'evacuazione, utilizzando il lato lungo della maniglia e tirare il materasso facendolo scivolare sul pavimento. Nel caso in cui si ha la necessità di curvare, basta sollevare il materasso dal lato dei piedi e farlo ruotare utilizzando il lato corto della cinghia:



9) In caso di utilizzo delle scale un operatore si posizionerà dal lato della testa e uno dal lato dei piedi. Usare una mano per afferrare il lato corto (se posizione di testa, mentre lato lungo se in posizione dei piedi) e l'altra per reggersi al corrimano.



In questo caso, sarà l'operatore a monte che potrà frenare e regolare la discesa lungo le scale. Per procedere sui pianerottoli delle scale, bisogna sollevare leggermente testa e gambe.